



ACESSÓRIOS

galvânicas alta frequência remoção pontos ultrassons vácuo spray escova


DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Equipamento	1 unid.
Cabo de Ligação	1 unid.
Sondas Ultra-Sónicas	2 unid.
Barra Eletroterapia por Alta Frequência	1 unid.
Tubo Eletroterapia por Alta Frequência	3 unid.
Removedor de Pontos	1 unid.
Tubo Vidro para Vácuo	3 unid.
Filtro	1 unid.
Pulverizador	1 unid.
Tubo Vermelho e Preto	1 unid. cada
Acessórios Escovagem	1 manípulo; 5 escovas
Acessórios Galvânica	1 conjunto

INTRODUÇÃO

O aparelho **Multifunções 7em1 RickiParodi** foi projectado de acordo com as funções necessárias e mais usadas nos salões de beleza, tais como: Vácuo, Spray, Electroterapia de Alta Frequência, etc. Cada função tem um interruptor separado. Fácil e simples de usar, superando assim alguns defeitos da maioria dos multifunções tradicionais. Inclui um suporte para os acessórios tornando mais prática a sua utilização.

INSTRUÇÕES

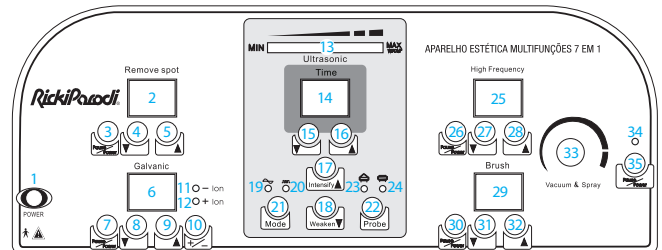

Colocar o equipamento em funcionamento: conecte-o à corrente e pressione o botão de ligar, as luzes **11, 19, 24** acendem-se e os ecrãs **2, 6, 25** e **29** apresentam "00". O ecrã **14** apresenta "20".

- | | |
|---|---|
| 1. Botão alimentação | 19. Luz indicadora onda pulsada |
| 2. Ecrã regulação intensidade / função remoção pontos | 20. Luz indicadora onda contínua |
| 3. Pausa / função remoção pontos | 21. Seleção tipo de onda |
| 4. Redução nível intensidade / função remoção pontos | 22. Seleção sonda ultra-sónica |
| 5. Aumento nível intensidade / função remoção pontos | 23. Luz indicadora sonda pequena |
| 6. Ecrã exibição intensidade galvânica | 24. Luz indicadora sonda grande |
| 7. Pausa / função galvânicas | 25. Ecrã exibição intensidade alta frequência |
| 8. Redução nível intensidade / função galvânicas | 26. Pausa / função alta frequência |
| 9. Aumento nível intensidade / função galvânicas | 27. Redução alta frequência |
| 10. Seleção indução / educação | 28. Aumento alta frequência |
| 11. Indicação função Educação | 29. Intensidade escovagem |
| 12. Indicação função Indução | 30. Pausa / função escovagem |
| 13. Ecrã exibição intensidade ultra-sónico | 31. Redução intensidade escovagem |
| 14. Ecrã visualização tempo | 32. Aumento intensidade escovagem |
| 15. Redução tempo | 33. Válvula vácuo |
| 16. Aumento tempo | 34. Luz indicadora Vácuo & Spray |
| 17. Aumento intensidade ultra-sons | 35. Pausa / função Vácuo & Spray |
| 18. Redução intensidade ultra-sons | |

ELECTROTHERAPIA POR ALTA FREQUÊNCIA

A Electroterapia de alta frequência é um bom assistente de tratamento anti-acne. A corrente de alta frequência infiltra-se na camada profunda da pele, gerando calor, e acelera a circulação sanguínea, ajuda a absorver a nutrição e expelir os resíduos. O calor pode relaxar os nervos tensos, ajudar o dissolvente a infiltrar-se na pele, e regular a produção de sebo. Ajuda a desinfetar e acelerar a cicatrização de feridas.

Utilização:

1. Conectar o cabo de alimentação com o manípulo de electroterapia.
2. Seleccione um tubo de vidro adequado.
3. Pressione o interruptor e botão "Power" (1).
4. Ajustar o tempo de trabalho com os botões "▲ / ▼" (15 / 16) sob o display "TIME" e a intensidade de trabalho com os botões "▲ / ▼" (27 / 28) sob o display de Alta Frequência (25). Pressione a tecla "Pause / Power" (26). Irá aparecer um ponto por trás do nível de intensidade e o aparelho começará a trabalhar.

Tratamentos:

1. TERAPIA DIRETA

A esteticista segura o manípulo e massaja o rosto com movimentos circulares durante 5 minutos. A corrente de alta frequência actuará na epiderme da pele, gera vibrações e calor, o ozono mata as bactérias. Usar para tratar pele oleosa e acne.

2. TERAPIA SAUDÁVEL

Coloque em contacto com a pele o tubo de eléctrodo de forma intermitente, quando o tubo se afasta da pele uma faísca ocorrerá. Este fenómeno ajuda a matar as bactérias e diminuir a inflamação, acelera a cicatrização de feridas. Executar este tratamento por cerca de 30 minutos. Se o paciente tem medo das faíscas, cobrir os olhos com uma toalha. Esta terapia é adequada para curar a acne no rosto.

Cuidados:

1. Ao fazer a terapia direta, limpe a pele e verifique se não há sujidade ou maquilhagem. Garanta que o tubo desliza de forma suave e constante.
2. Ao fazer a terapia saudável, comunicar aos pacientes a possibilidade de ocorrência de faíscas e ruído de forma a prevenir eventuais sustos. Não toque no paciente de forma aleatória, para evitar interferências e influenciar o efeito curativo.
3. Ajustar o tempo de funcionamento e intensidade de acordo com a tolerância e sensibilidade da pele. Pele desidratada deve ser tratada com curto período de tempo e fraca intensidade. Pele oleosa com mais tempo e mais forte intensidade.
4. Retirar todas as jóias antes do tratamento de forma a evitar ferimentos por condução eléctrica.
5. Mantenha os acessórios limpos e secos, procedendo à desinfecção antes e após o seu uso.
6. Não segure a junção do tubo e base metálica, podendo ocorrer descarga eléctrica após ligar o aparelho.
7. Não toque nas zonas dos olhos durante o tratamento.
8. Pacientes com pele sensível, doença vascular, acne rosácea e doenças cutâneas graves não podem usar esta máquina.

CORRENTE GALVÂNICA

De acordo com o princípio de que os opostos se atraem, este processo ajuda à absorção dos ativos presentes nos cosméticos ao mesmo tempo que expelle as impurezas da pele.

O **eléctrodo positivo** irá gerar uma reação ácida, estabilizar os terminais nervosos, promover a contração dos vasos sanguíneos e fortalecer os tecidos. Utilizado essencialmente para reduzir inflamações, ativar os princípios ativos dos cosméticos e acelerar a sua absorção após o tratamento cosmético.

O **eléctrodo negativo** vai gerar reação alcalina, estimular os terminais nervosos, aumentar a circulação sanguínea e amaciar os tecidos. O seu uso destina-se ao tratamento da pele envelhecida ou oleosa.

Utilização:

1. Conecte o acessório das galvânicas.
2. Humedeça com a essência um pouco de algodão e aplique no rosto da cliente.
3. Ligue o aparelho. Ajuste o tempo de trabalho com os botões "▲ / ▼" (15 / 16) sob o display "TIME" (14) e a intensidade de trabalho com os botões "▲ / ▼" (8 / 9) sob o display que identifica a Galvânica (6). Um ponto aparece atrás do nível de intensidade. O aparelho inicia o trabalho.
4. Ajuste a intensidade para o nível mais baixo, a cliente deve segurar a vara de metal e a esteticista o acessório com rolo. (Se operar por si, mantenha os acessórios em mãos distintas.)
5. Seleccione ânodo (**pólo negativo**) ou cátodo (**pólo positivo**) de acordo com a necessidade da cliente. Quando o instrumento indica ânodo, a vareta é cátodo e o ânodo o rolo. Use um pedaço de algodão humedecido com essência cosmética e espalhe sobre a pele. Embrulhe o rolo em algodão embebido na essência para induzir a nutrição. Ao contrário, use o algodão humedecido por solução germicida ou loção tonificante para embrulhar o rolo e assim remover as impurezas. Pressione "+/-" (10) para alternar entre ânodo e cátodo.
6. Ajuste a intensidade de acordo com a sensibilidade da pele da cliente. Role o rolo lentamente por 5-6 minutos. Mantenha o algodão humedecido para conseguir o melhor efeito.
7. Depois de terminar o tratamento, não retire o rolo imediatamente pois a cliente pode sentir uma sensação desconfortável.

Cuidados:

1. Após o tratamento, limpe o rolo e a vareta. Guarde num ambiente seco, caso contrário a camada de galvanizados pode sofrer de corrosão.
2. Pessoas com pele sensível, inflamações, feridas, doenças de pele grave e angioectasis bem como mulheres grávidas, não devem ser sujeitas a este tratamento.
3. Retirar todas as jóias de metal antes do tratamento. Pessoas com materiais de metal no interior do corpo não devem ser sujeitas a este tipo de tratamento.
4. A acidez e a alcalinidade da essência devem ser aplicadas ao uso do ânodo e do cátodo. Quando o rolo é ânodo, ele irá induzir a essência ácida e edificar a alcalina. Ao contrário, irá induzir a essência alcalina e edificar o ácido. Se a essência não é ácida ou alcalina, teste com papel PH.
5. Enquanto seleccionar para ser ânodo, a sensação de picada vai ser mais forte do que com o cátodo. Seleccione em conformidade.

ULTRA-SONS

Através da vibração de alta frequência (1MHz - 3MHz), gera ultra-sons com forte penetração. É um instrumento especial que irradia uma onda alternada a qual se propaga em redor. É muito mais forte que a onda sónica normal, com alta frequência, conseguindo-se assim uma boa orientação, forte penetrabilidade e grande expansibilidade.

Devido à vibração de alta frequência, produz uma suave micro-massagem às células da pele, acelera a circulação sanguínea, facilita o metabolismo, ativa as células e melhora a absorção da nutrição.

A micro-massagem por alta frequência pode eliminar as células idosas, expelir as toxinas e reduzir as rugas. Utilizada juntamente com produto cosmético ou medicinal, ajuda a obter melhores resultados.

A frequência dos ultra-sons também pode gerar vibração de ressonância das células, consumir gorduras e melhorar a capacidade das células na absorção da água, rejuvenescendo e melhorando a elasticidade da pele.

Utilização:

1. Antes de utilizar este tratamento limpe a pele.
2. Depois de limpar a pele, escolha o produto apropriado segundo a condição da pele de modo a obter o melhor resultado.
3. Conecte à corrente e ligue o aparelho "Power" (1).
4. Ajuste a duração de trabalho com os botões "▲ / ▼" (15 / 16) sob o display "TIME" e a intensidade de trabalho com os botões "▲ / ▼" (17 / 18).
5. Pressione o botão "▷ / ◁" (19 / 20) para seleccionar a onda pulsada ou contínua.
6. Selecione o acessório adequado, o mais pequeno para zonas mais reduzidas e ajuste da alavanca do nível 1 ao 5; o maior para superfícies maiores e ajuste do nível 5 ao 10. Ajuste o período de tratamento de 8 a 10 minutos.
7. Enquanto procede ao tratamento, a esteticista deve usar o acessório de forma firme, girar lentamente e de forma exata e, assim, aplicar um tratamento necessário.
8. Remova o acessório findo o tratamento, mantenha a essência na pele da cliente para a deixar penetrar por completo.

Cuidados:

1. Pacientes com angiocardiopatia, doenças hemorrágicas, ferimentos ou mulheres grávidas não podem ser sujeitos a este tratamento.
2. Mantenha os acessórios limpos e secos. Nunca lavar com água, desinfetar e limpar com algodão e desinfetante. Não deixe cair os acessórios, podem danificar-se.
3. Não deixe as sondas ligadas fora dos períodos de tratamento, correndo assim riscos de danificar o equipamento.
4. Nunca usar em redor dos olhos.
5. Pessoas com hipersensibilidade, cirroses e problemas renais não podem ser sujeitas a este tratamento.

REMOÇÃO DE MANCHAS

Por meio da coagulação da corrente elétrica de alta frequência, estimula a necrose celular da epiderme, que pode eliminar completamente todos os tipos de manchas no rosto ou qualquer outra superfície da pele. O efeito é óbvio sem hemorragias ou cicatrizes.

Utilização:

1. Conecte o acessório à tomada correspondente.
2. Conecte o cabo de alimentação e ligue o aparelho.
3. Ajuste o tempo de trabalho com os botões "▲ / ▼" (15 / 16) sob o display do tempo "TIME" (14) e a intensidade de trabalho com os botões "▲ / ▼" (4 / 5) sob o display removedor de pontos "REMOVE SPOT" (2). Um ponto aparecerá atrás do nível de intensidade. O aparelho começa a funcionar.
4. Toque no local pretendido com o acessório. Após o tratamento, utilizar um revestimento antimicrobiano na zona tratada por 2 ou 3 dias.

Cuidados:

1. Enquanto faz o tratamento, manter a distância adequada entre o acessório e a pele. Não exerça demasiada força na pele ou permaneça na mesma posição durante muito tempo, pois corre o risco de queimaduras ou cicatrizes.
2. Se a mancha não for removida numa só aplicação, repetir o tratamento após esfoliação.
3. Após o tratamento, evitar forte exposição solar ou aplicação de protetores solares. Deixar a pele descolar de forma natural na zona tratada. Nunca remover essa camada de pele manualmente, uma vez que pode originar infeções e deixar cicatrizes.
4. Antes de proceder ao tratamento desinfete a zona a tratar bem como o acessório.



VÁCUO & SPRAY

Os tubos de vidro aplicam-se para remoção de acne, pústulas, remover sujidade de modo a manter a pele limpa e fresca.

O pulverizador converte a loção tonificante, anti-inflamatória em vapor e pulveriza-o.

Utilização:

1. Ligue o aparelho.
2. Pressione o botão "Pause/Power" (35), quando o indicador luminoso (34) acender o aparelho está pronto a ser utilizado.
3. Conecte o tubo de vidro numa das extremidades do tubo de borracha e na outra o filtro, que por sua vez ligar-se-à à saída de vácuo do aparelho.
4. Se pretende utilizar a função Spray, conecte o vaporizador ao tubo e posteriormente a outra extremidade do tubo à saída de spray do aparelho. Segure o pulverizador e pressione o orifício de ventilação com o dedo indicador. A pressão do ar será acumulada dentro do frasco e estará tudo pronto para pulverizar a loção tonificante.

Cuidados:

1. Existem 3 tipos de acessórios de vidro, escolha o adequado de acordo com a zona a tratar.
2. Remova o acessório do tubo com apoio do dedo, não o puxe diretamente uma vez que poderá partir o acessório.
3. Quando utiliza a função de Vácuo não permaneça no mesmo sítio por longos períodos de tempo, pois poderá causar lesões.
4. Quando utiliza a função Spray, peça à cliente para fechar os olhos e a boca. Inicie a pulverização partindo da testa e mantenha uma distância adequada entre o pulverizador e o rosto, não pulverize o interior do nariz.
5. Mantenha os tubos de vidro sempre limpos e secos.
6. Não utilize loções com sedimentos ou impurezas, já que tal poderá causar obstrução no pulverizador.
7. Nunca conecte o pulverizador à saída de vácuo ou a loção tonificante será aspirada para a bomba e danificará a máquina.
8. Desligue sempre o aparelho da corrente elétrica quando não o estiver a utilizar.

ESCOVAGEM

Permite uma micro massagem da pele, elimina as células envelhecidas, expõe toxinas e reduz rugas. Combinada com produtos cosméticos pode melhorar o seu efeito.

Com a força da escova rotativa, proporciona uma excelente massagem à pele. Limpa e esfolia as cutículas envelhecidas. Após limpar as impurezas e as cutículas mortas, a pele fica mais saudável e tonificada, devido a aceleração da circulação sanguínea e remoção da fadiga.

Com a massagem, a elasticidade da pele é melhorada, tornando-a também mais suave e luminosa.

Utilização:

1. Conecte o acessório adequado e ligue o aparelho (1).
2. Ajuste o tempo de tratamento com os botões "▲ / ▼" (15 / 16) sob o display "TIME" e a intensidade com os botões "▲ / ▼" (31 / 32) sob o display "BRUSH" (29). Um ponto aparecerá atrás do nível de intensidade.
3. Ligue o manípulo, ajuste a intensidade e rode a frequência de acordo com o estado da pele a tratar.
4. No fim do tratamento desligue o aparelho, limpe e desinfete a cabeça de escovagem.

Cuidados:

1. Não deixe cair cabelos na escova.
2. Use vapor para amolecer a pele antes de um tratamento.
3. Após o tratamento, a paciente não deverá efetuar depilação facial, esfoliação com creme e deverá afastar-se de locais pouco ventilados durante 1 a 2 dias.
4. Os tratamentos devem ser espaçados num mínimo de 3 semanas.
5. Um tratamento deve ter uma duração máxima de 15 a 20 minutos.

RickiParodi[®]

Distribuidor exclusivo PORTUGAL RickiParodi, SA.

Sede Rua de Sístelo, 237 | 4435-452 Rio Tinto (Porto)

tel 229 756 964 | fax 229 756 015

e-mail info@rickiparodi.com | web www.rickiparodi.com